

**Neurotransmitters in urine Basis (F500) + Plus (F510) + Serotonine (F550) + Adrenaline (F600) + D-Arabinitol (A125) + organische zuren (E408) + Marker vitamine stofwisseling (E435)**



## Gebruiksaanwijzing

### De testset bevat de volgende onderdelen:

**1 x aanvraagformulier**

**1 x handleiding**

**1 x urinebuisje met wit dopje** (bevat een stabilisator = wit/gele substantie)

**1 x plastic pipetje** voor het overbrengen van de urine in het urinebuisje met het witte dopje

**1 x in te vullen etiket** voor het urinebuisje

**1 x lekvrije sealbag met vliesdoekje**

**1 x verzendenvelop**

### Handleiding:

Het urinebuisje moet met de **tweede ochtendurine** tot aan de bovenste markering gevuld worden. Volg hiervoor onderstaand advies:

- Vang de tweede ochtendurine na het opstaan op in de opvangbeker voor de urine (of in een ander schone opvangbak).
- Vul nu met behulp van de plastic pipet het urinebuisje met het witte dopje tot aan de bovenste markering = ca. 5 mm onder het dopje. Let er daarbij op dat de wit/gele stabilisator in het buisje blijft.
- De opvangbeker en de pipet kunnen weggegooid worden.

### Vergeet niet het urinebuisje te voorzien van:

- **uw naam**
- **de datum**
- **bij materiaal Urine aankruisen**

Stop het beschreven urinebuisje in het lekvrije sealbag en stop dit samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.

**LET OP: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag!**